


Nebulizzatore ad ultrasuoni **ATOMISOR MEGAHERTZ®**

CE 0459

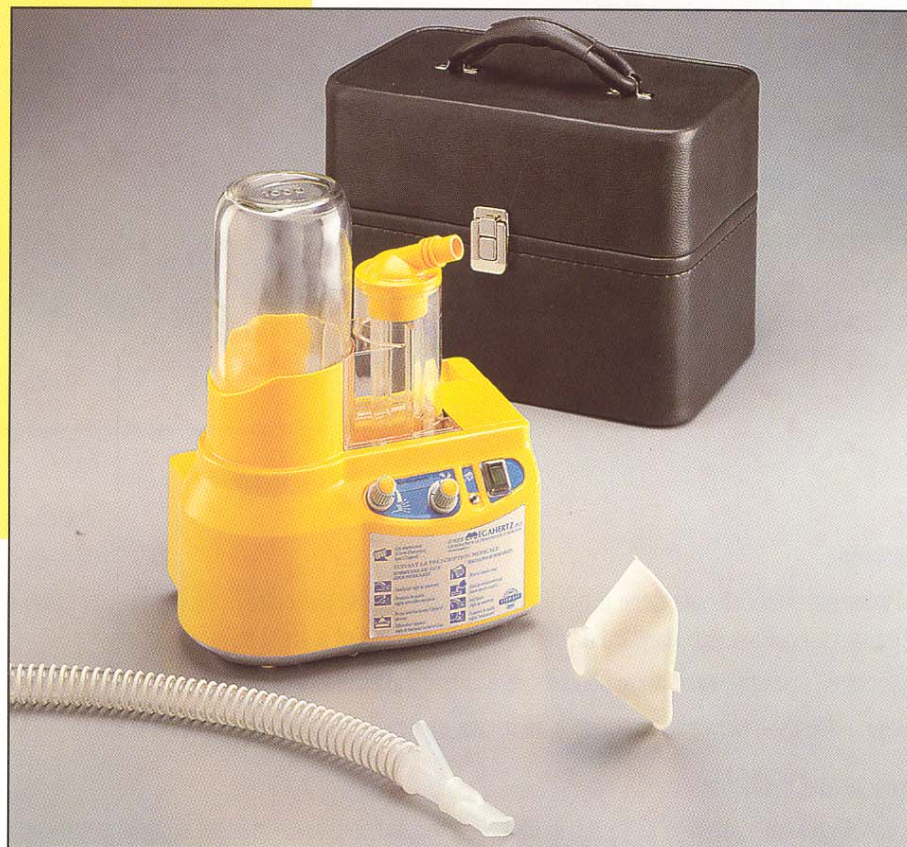

Indicazioni terapeutiche : **PATOLOGIE BRONCOPOLMONARI**

• asma • bronchiti • pneumopatie • mucoviscidosi

UMIDIFICAZIONE

- ▶ Acqua, soluzione fisiologica, o medicinale diluito in soluzione acquosa ;
- ▶ Lunga autonomia operativa ;
- ▶ Funzionamento silenzioso ;
- ▶ Riscaldatore a richiesta ;

NEBULIZZAZIONE DEL MEDICAMENTO

- ▶ Medicinale diluito in soluzione acquosa ;
- ▶ Kit di nebulizzazione : 2 ÷ 15 ml ;
- ▶ Limitato residuo ;
- ▶ Facile nell'uso ;

▶ **UN PRODOTTO ATOMISOR = UNA GARANZIA DI AFFIDABILITA'**

LA QUALITA' ATOMISOR : UN RIFERIMENTO

Distribuito da :


FASET

ERGONOMIA :

- Ventilazione integrata (senza tubi aria);
- Livello costante dell'acqua automatico (senza tubi ne raccordi);
- Allarme luminoso: interruzione automatica di sicurezza nel caso di liquido insufficiente;
- Alloggiamento per il cavo di alimentazione;
- Valigetta per il trasporto

PRESTAZIONI :

- Granulometria: MMAD 3.5 µm
- Nebulizzazione e ventilazione regolabili :
 - Portata liquidi: 40 ÷ 250 ml/h;
 - Portata aria: 0 ÷ 40 l/min

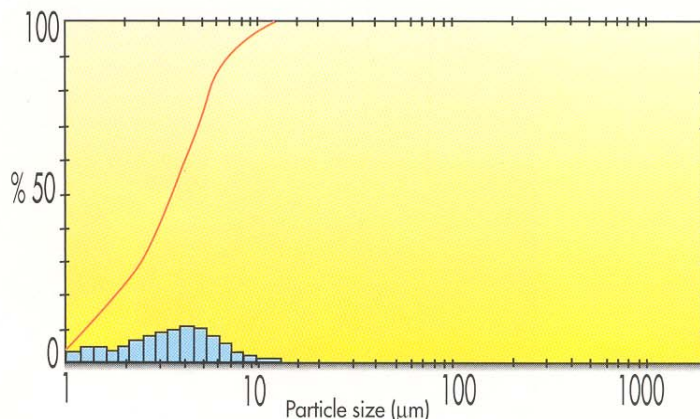

INERIS - Malvern - Nov. 1994

USO :

Umidificazione :

- la valvola che automaticamente tiene il livello dell'acqua costante permette l'utilizzo di tutti i vasi con un diametro di max 100 mm, con collo a vite standard da 40 mm, (vasi da 500 ml o 1000 ml);
- lunga autonomia operativa (nebulizzazione e ventilazione media: 3 ore con vaso da 500 ml);
- riscaldatore a richiesta: permette di ottenere, in uscita, un aerosol a una temperatura che va dai 30°C ai 40°C;

Nebulizzazione dei medicinali :

- per una nebulizzazione inferiore ai 15 ml, si utilizza il kit di nebulizzazione con un tubo porta coppetta e un riduttore che permette di nebulizzare circa 3 ml di medicinale, con un limitato residuo.

CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Frequenza del quarzo: 2,4 Mhz
- Assorbimento: 65 VA
- Garanzia: 1 anno
- Alimentazione: 230 Volt
- Peso: 4,3 Kg

MEDICINALI NON COMPATIBILI :

La nebulizzazione ultrasonica, non permette la nebulizzazione di medicinali oleosi ne sospensioni.
Sono sconsigliati i cocktail di medicinali.

CODICI DI RIFERIMENTO PER L'ORDINAZIONE :

- AMGH (apparecchio + kit di nebulizzazione)
- AMGHV (apparecchio con valigetta + kit di nebulizzazione)
- AMGHV6 (apparecchio con valigetta + 6 kit di nebulizzazione)
- AMGKIT : (kit di nebulizzazione)
- DRF : (riscaldatore completo per AMGH)
- AMGST : (supporto con ruote per AMGH)